

CPR Dura-padz™

ZOLL®



Uma solução exclusiva
para desfibrilação
com mãos livres



Pás reutilizáveis e que deixam as mãos livres com feedback de RCP de alta qualidade



O CPR Dura-padz™ não tem similar. É o único sistema de pás flexível, reutilizável e que deixa as mãos livres disponível atualmente. Um único CPR Dura-padz pode ser utilizado para até 100 pacientes. O CPR Dura-padz oferece a eficácia em termos de custo característica das pás convencionais e a segurança e comodidade dos eletrodos descartáveis.

RCP de alta qualidade para todos os pacientes

As evidências são claras. A RCP contínua e de alta qualidade é fundamental durante qualquer ressuscitação, independentemente de o choque ser indicado ou não. O CPR Dura-padz incorpora um sensor de RCP patenteado, de modo que o socorrista tenha acesso aos benefícios da tecnologia Real CPR Help® da ZOLL, que fornece o feedback crítico que o orienta a realizar as compressões na profundidade e frequência especificadas nas Diretrizes em vigor. Por exemplo, se as compressões não forem suficientemente profundas, o socorrista ouvirá “Comprima mais forte”.

O CPR Dashboard™ da ZOLL mostra dados em tempo real sobre a profundidade, frequência e liberação da compressão. O See-Thru CPR® elimina os artefatos da compressão da RCP no ECG e permite que o ritmo subjacente seja observado durante a RCP.



Fácil de usar


Projetado para ser fácil de usar: basta aplicar um quadrado de gel CPR Dura-padz a cada uma das pás que deixam as mãos livres e fixá-las no paciente. Depois selecione o tratamento — monitoramento, desfibrilação ou cardioversão. O controle do uso também é simples. O CPR Dura-padz contém um cartão de contagem, para que você saiba quando atingir 100 utilizações.

Simple e prático

O CPR Dura-padz simplifica a ressuscitação. Quadrados de gel individuais, de uso único, oferecem uma conexão eficiente do eletrodo com o paciente. Quando terminar, retire-os e descarte-os. Limpe as pás do CPR Dura-padz, que deixam as mãos livres, e elas estarão prontas para o próximo paciente.

O CPR Dura-padz oferece uma flexibilidade não encontrada nas pás convencionais. Com o CPR Dura-padz, pessoas treinadas em suporte básico de vida podem fazer desfibrilação no modo DEA e o tratamento pode continuar quando os profissionais de suporte avançado de vida chegarem.

Com o CPR Dura-padz, pela primeira vez a desfibrilação com mãos livres está disponível em uma solução reutilizável, com boa relação custo/benefício e exclusiva da ZOLL.

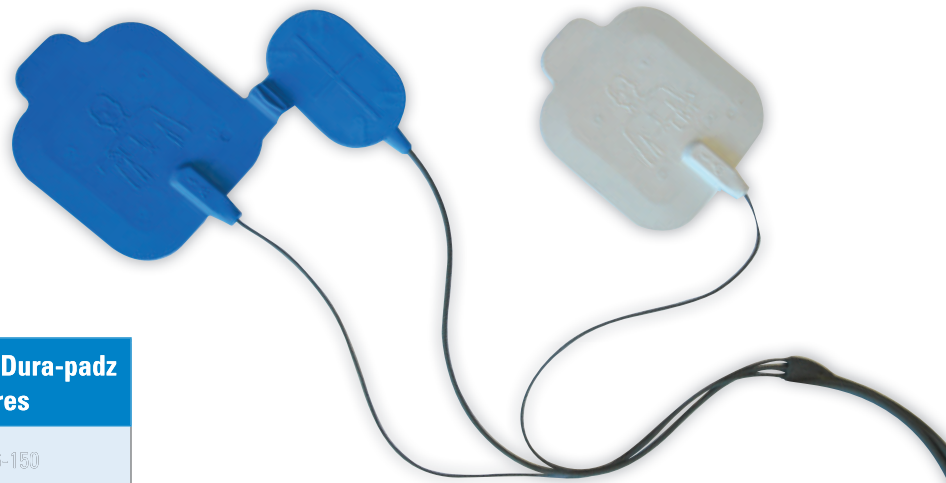

Especificações gerais das pás do CPR Dura-pad reutilizáveis e que deixam as mãos livres

Material sobremoldado no eletrodo	Silicone Dow CE-150
Material do cabo	Série DSM Sarlink 3100
Elemento condutor	Aço inoxidável 316L (passivado de acordo com a ASTM-A967)
Método de conexão	Conector ZOLL chaveado
Embalagem	Embalagem protetora de poliuretano
Vida útil esperada	100 utilizações
Classe de impedância	Baixa

Sobremoldagem no eletrodo (ápice e esterno)

Comprimento	15,09 cm
Largura	12,85 cm
Área	165,23 cm ²

Superfície condutora (ápice e esterno)

Superfície de terapia	Matriz de 3 x 3 medindo 7,77 cm x 7,77 cm
------------------------------	---

Sobremoldagem no sensor (ápice e esterno)

Comprimento	11,74 cm
Largura	6,35 cm
Comprimento do fio condutor	182,88 cm, no mínimo

Especificações gerais do gel do CPR Dura-pad

Material da estrutura adesiva	Espuma de polietileno de célula fechada
Gel condutor	Polímero adesivo sólido
Embalagem	Bolsa laminada com várias camadas de alumínio
Vida útil	24 meses
Classe de impedância	Baixa

Eletrodo em geral (ápice e esterno)

Comprimento	13,34 cm
Largura	13,34 cm
Área	170,39 cm ²

Gel condutor (ápice e esterno)

Comprimento	10,16 cm
Largura	10,16 cm
Área	98,97 cm ²

ADVANCING RESUSCITATION. TODAY.®

ZOLL Medical Corporation | 269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824, EUA | +1 978-421-9655 | +1 800-804-4356 | www.zoll.com

Copyright © 2015 ZOLL Medical Corporation. Todos os direitos reservados. Advancing Resuscitation. Today., Dura-pad e ZOLL são marcas comerciais ou marcas registradas da ZOLL Medical Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as outras marcas registradas são propriedade dos respectivos proprietários. As pás CPR Dura-pad que deixam as mãos livres estão disponíveis em mercados selecionados fora da América do Norte.

Impresso nos EUA.
MCN HP 1412 0111-24

Para obter os endereços e os números de fax das subsidiárias, bem como outros locais internacionais, acesse o site www.zoll.com/contacts.

ZOLL®